

CARELEAVES™
ケアリーヴ™に

超大判 登場。

NEW

NEW



大きなやさしさで、そっと寄り添う。

大きなやさしさで、 そっと寄り添う。

1997年、「木の葉のようにやさしく包む」という

想いを込めて生まれたケアリーヴ™。

素肌のような貼りごちでキズと肌に寄り添い、

多くの方に愛されてきました。


そして、20年以上の時を経て、肘や膝の大きなキズを見つめ直した、

「ケアリーヴ™ 超大判」が誕生。

肌へのやさしさと、かぶれにくさを追求した特殊形状、

曲げ伸ばしにもフィットする新開発の伸縮パッド、

ニチバンの変わらない想いを込めてお届けします。

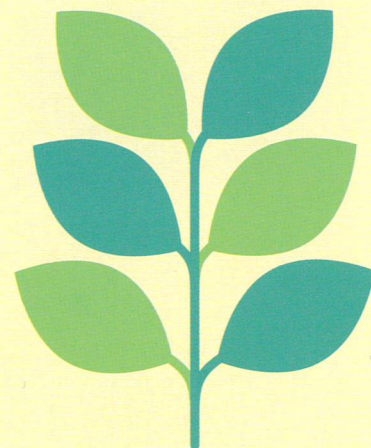

新開発


よく伸びる伸縮パッド採用



優れた伸縮性

皮ふの動きに追従する「伸縮パッド」なので、
違和感なく肌にフィットします。

〈パッドの引張特性〉

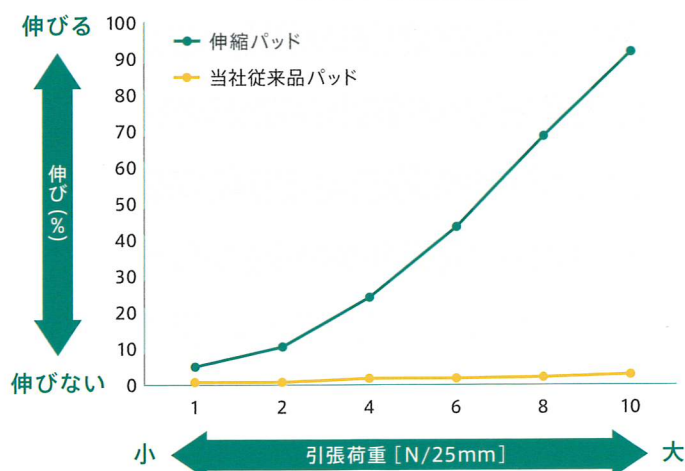


*掲載データは社内データであり、保証値ではありません。

肌へのやさしさを追求した特殊形状

CARELEAVES™ ケアリーヴ 超大判

40種類以上の形状を検討した中から、皮ふ刺激の少ない形状を採用。
テープの角にくぼみを入れた、特殊形状。当社従来品を大きく上回る品質を実現。

[Mサイズ 実物大]

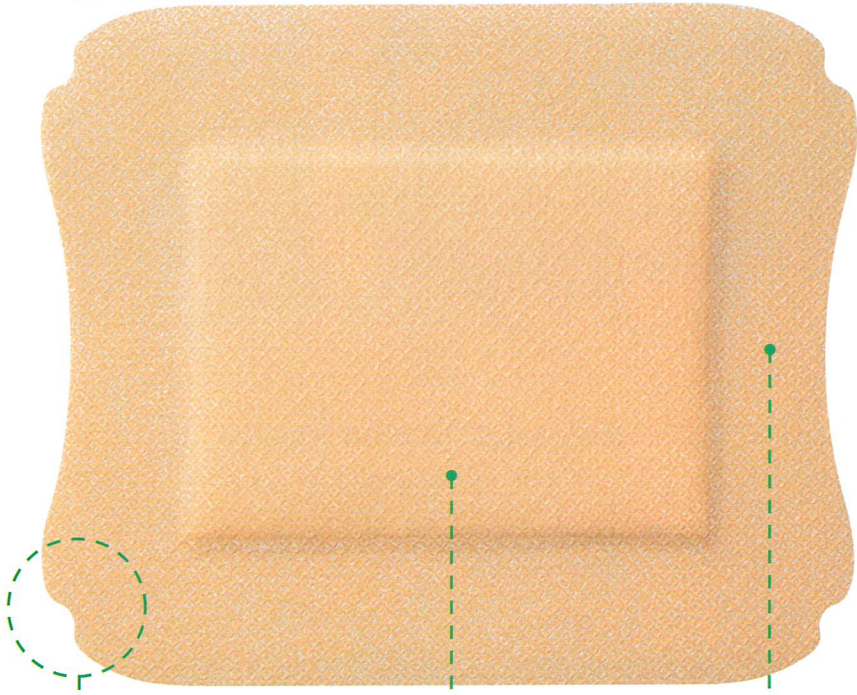


特殊形状で
かぶれにくい

新開発「伸縮パッド」で
よく伸びる

高密度ウレタン不織布
全方向に伸縮

[Mサイズ 実物大]

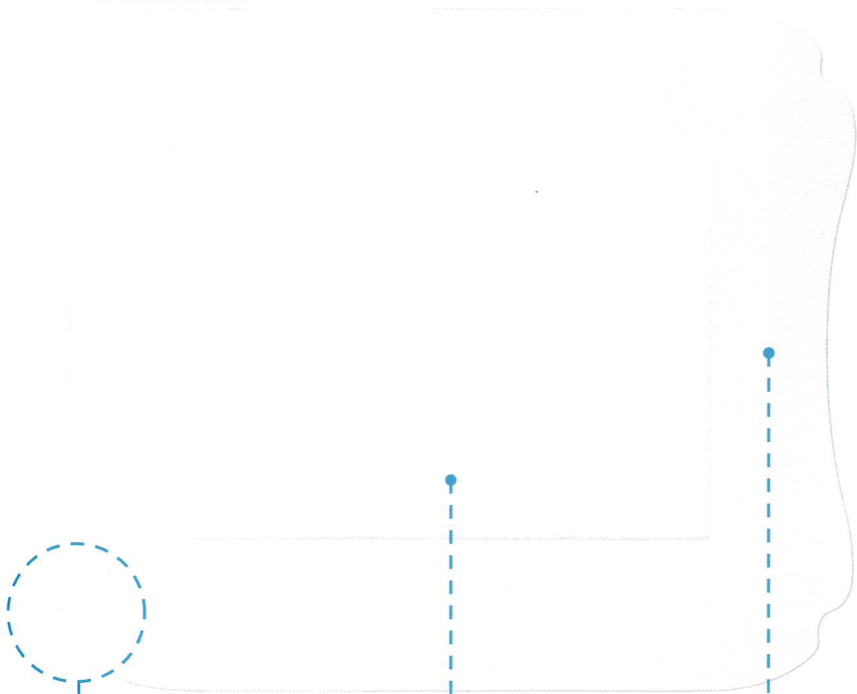


特殊形状で
かぶれにくい


新開発「伸縮パッド」で
よく伸びる

防水テープ
水からキズを守る

素肌タイプ

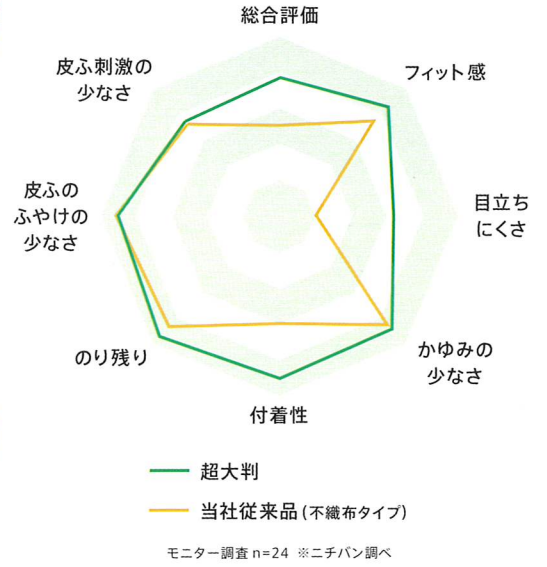

防水タイプ

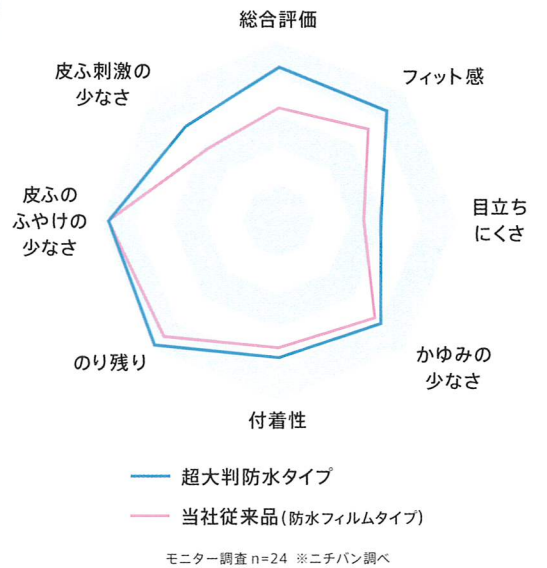

ケアリーヴ™ 超大判 Line up

素肌タイプ
Mサイズ〈4枚入り〉



テープサイズ 90×108mm
パッドサイズ 50×70mm

素肌タイプ
Lサイズ〈3枚入り〉



テープサイズ 100×125mm
パッドサイズ 60×75mm

防水タイプ
Mサイズ〈4枚入り〉



テープサイズ 90×108mm
パッドサイズ 50×70mm

防水タイプ
Lサイズ〈3枚入り〉



テープサイズ 100×125mm
パッドサイズ 60×75mm

テープもパッドもよく伸びて、ぴったりフィット

全方向に伸縮する高密度ウレタン不織布と伸縮パッドを使用している
ので、関節を曲げてもぴったりフィットします。蒸気を通すので、肌が白
くふやけにくく、キズの周りの健康な肌にストレスをかけません。

防水フィルムで水からキズを守る

テープに防水フィルムを使用しているため、入浴も安心。蒸気は通して、
水を通さないフィルムと肌にやさしいウレタンジェル粘着剤を使用。は
がす時の痛みを軽減します。

一般医療機器 救急絆創膏

品名	品番	内容	包装	入目	希望小売価格 (消費税別)	JANコード	JANコード 中箱・梱 G-TINコード	個箱サイズ(幅×奥行×高さ) 中箱サイズ(幅×奥行×高さ) 梱サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	
ケアリーヴ™ 超大判 Mサイズ	CLCHO4M	Mサイズ 4枚入り	個装	—	580円	4 987167 093921	4987167093921	125×7×193 mm	19g	
			中箱	10コ				24987167093925	127×90×197 mm	233g
			梱箱	100コ				14987167093928	265×465×212 mm	2.7kg
ケアリーヴ™ 超大判 Lサイズ	CLCHO3L	Lサイズ 3枚入り	個装	—	580円	4 987167 093938	4987167093938	135×5×208 mm	18g	
			中箱	10コ				24987167093932	137×70×212 mm	232g
			梱箱	100コ				14987167093935	285×365×227 mm	2.7kg
ケアリーヴ™ 超大判 防水タイプ Mサイズ	CLCHOB4M	Mサイズ 4枚入り	個装	—	630円	4 987167 093945	4987167093945	125×7×193 mm	18g	
			中箱	10コ				24987167093949	127×90×197 mm	224g
			梱箱	100コ				14987167093942	265×465×212 mm	2.6kg
ケアリーヴ™ 超大判 防水タイプ Lサイズ	CLCHOB3L	Lサイズ 3枚入り	個装	—	630円	4 987167 093952	4987167093952	135×5×208 mm	17g	
			中箱	10コ				24987167093956	137×70×212 mm	224g
			梱箱	100コ				14987167093959	285×365×227 mm	2.6kg

使用上の注意

TMは商標です。 MADE IN JAPAN 日本製

- 患部を清潔にし、粘着面がキズぐちに当たらないよう使用してください。
- パッドが水などでぬれたり汚れたりした時や、血液や滲出液などの漏れがみられた時は、新しいものに貼り替えてください。
- 皮ふの薄い箇所など、刺激が出やすい箇所への使用はお控えください。
- 本品の使用により発疹・発赤、水泡、皮ふはく離、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- はがす時は皮ふを傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
- 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい、小児の手のとどかない所に保管してください。
- パッドサイズより大きなキズには使用しないでください。

再使用しないでください

このカタログの内容は、2019年7月現在のものです。